
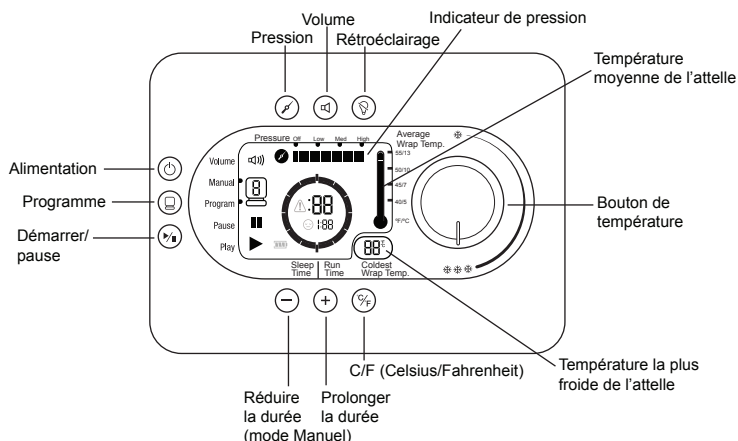



SYSTÈME GAME READY

PANNEAU DE COMMANDE

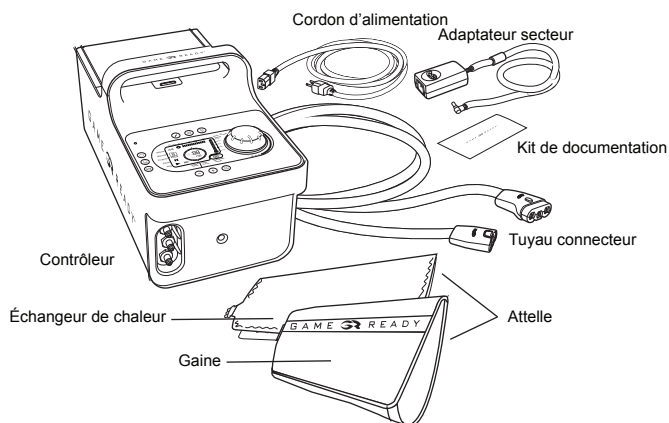


MISE EN ROUTE DU SYSTÈME


ÉTAPE 1 Pousser le bouton de libération de la porte pour ouvrir la porte du compartiment à glace.

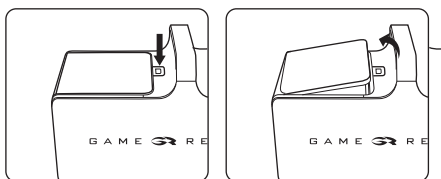

ÉTAPE 2 Remplir complètement le compartiment avec de la glace et au moins à moitié avec de l'eau propre.

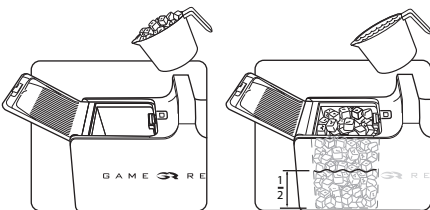


ÉTAPE 3 Fermer la porte du compartiment à glace. S'assurer qu'un clic est entendu.

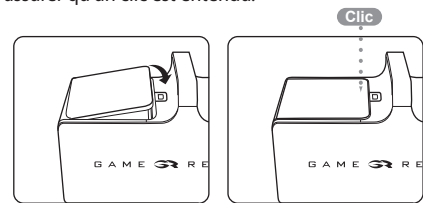


ÉTAPE 4 Placer le contrôleur dans le lieu où il sera utilisé. Utiliser le contrôleur uniquement dans une orientation à la verticale, tel qu'illustré.

ÉTAPE 5 Raccorder l'adaptateur secteur au contrôleur et à la prise électrique mise à la terre. Remarque : Allumer le contrôleur avant de connecter une attelle.

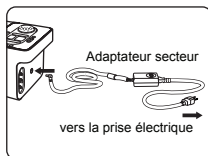

ÉTAPE 6 Raccorder l'extrémité plus large du tuyau connecteur au contrôleur. S'assurer qu'un clic est entendu. Pour déconnecter, appuyer simplement sur le bouton et retirer le connecteur du port.

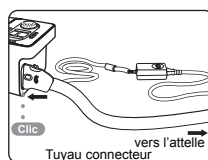


ÉTAPE 7 Mettre en place sur le corps l'attelle sélectionnée (consulter le guide d'utilisation de chaque attelle pour des directives de mise en place).

ÉTAPE 8 Raccorder l'extrémité plus petite du tuyau connecteur à l'attelle. S'assurer qu'un clic est entendu. Pour déconnecter, appuyer simplement sur le bouton et retirer le connecteur du port.



ÉTAPE 9 Appuyer sur le bouton d'alimentation.

ÉTAPE 10 Régler la température en tournant le bouton de température. Tourner le bouton vers la droite, en direction des trois (3) flocons de neige, pour fournir une thérapie plus froide. Tourner le bouton vers la gauche, en direction d'un (1) flocon de neige, pour fournir une thérapie moins froide. Toujours démarrer le contrôleur avec le bouton réglé sur le froid maximum et le faire fonctionner sur ce réglage pendant au moins deux minutes.

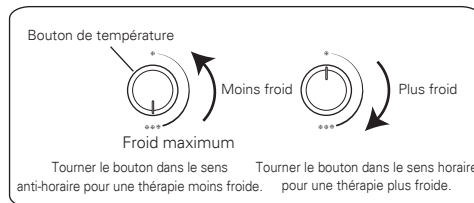

ÉTAPE 11 Le système peut fonctionner en mode Manuel ou en mode Programme, selon les préférences de l'utilisateur. Le mode Manuel permet d'ajuster les réglages de durée et de pression. Le mode Programme permet de choisir parmi six programmes qui fournissent le traitement pendant une durée pré-réglée, puis mettent le système en attente (pas de traitement) pendant une durée pré-réglée, en continu et à un réglage de pression spécifique. Consulter la page 15 du manuel d'utilisation du contrôleur pour des informations détaillées. Le système passe par défaut en mode Manuel.

Mode Manuel (Manual) :
Régler la durée en utilisant les boutons +/- (- +)
Régler la pression en appuyant sur le bouton de pression.

Mode Programme (Program) :
Appuyer sur le bouton de programme pour entrer en mode Programme. Continuer à appuyer sur le bouton de programme pour faire défiler les programmes disponibles.

ÉTAPE 12 Appuyer sur le bouton démarrer/pause.

ATTENTION : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un professionnel de la santé ou sur son ordonnance. **Avertissement :** Une mise en place incorrecte des attelles ou une utilisation prolongée du Game Ready risque de provoquer des lésions tissulaires, comme des gelures. Observer les recommandations du médecin. Cesser immédiatement d'utiliser le système si le patient ressent une sensation de brûlure ou de démangeaison, ou en cas d'aggravation de la douleur et du gonflement. Surveiller fréquemment la peau au niveau du site de la cryothérapie et cesser immédiatement d'utiliser le système si des changements tels que cloques, rougeurs aggravées, coloration anormale ou boules d'œdème se produisent.

Attention : Manipuler le contrôleur avec soin, comme vous le feriez pour un ordinateur portable. Ne pas le laisser chuter, ne pas cogner dessus ni l'abuser de toute autre manière. Ce type d'usage abusif risque d'annuler toutes les garanties Game Ready.



Consulter la page 5 du manuel d'utilisation du contrôleur pour des avertissements et contre-indications supplémentaires.