



IL SISTEMA GAME READY

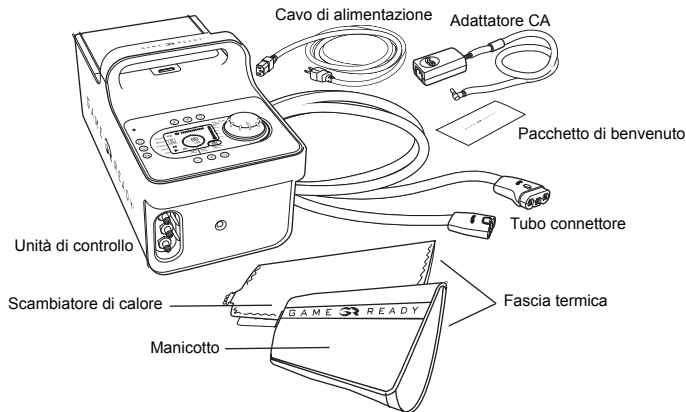


PANNELLO DI CONTROLLO

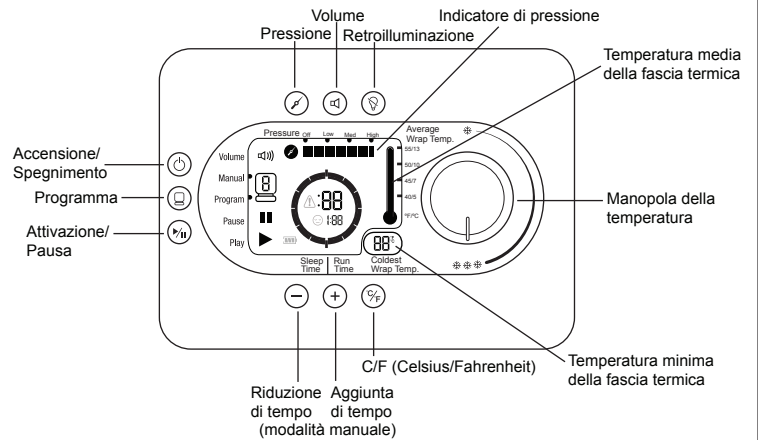


OPERAZIONI INIZIALI


PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di rilascio per aprire lo sportello del portaghiaccio.

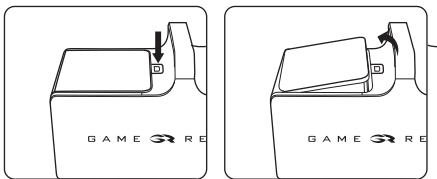

PASSAGGIO 2 Riempire completamente il portaghiaccio con ghiaccio e almeno a metà con acqua pulita.

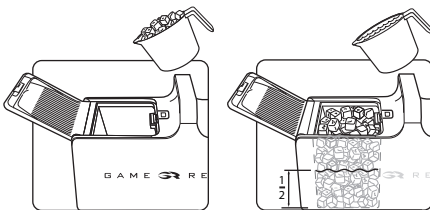


PASSAGGIO 3 Chiudere lo sportello del portaghiaccio. Assicurarsi di sentire lo scatto di chiusura.

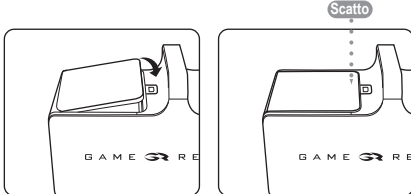


PASSAGGIO 4 Sistemare l'unità di controllo dove si intende usarla. L'unità di controllo va usata mantenendola sempre in posizione eretta, come illustrato.

PASSAGGIO 5 Collegare l'adattatore CA all'unità di controllo e alla presa elettrica provvista di messa a terra. Nota - L'unità di controllo deve essere accesa prima di collegare la fascia termica.

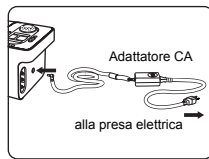


PASSAGGIO 6 Collegare l'estremità più grande del tubo connettore all'unità di controllo. Assicurarsi di sentire lo scatto di chiusura. Per scollegare basta premere il pulsante e staccare il connettore dalla sua presa.

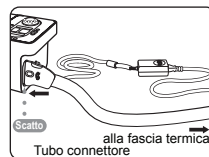


PASSAGGIO 7 Applicare la fascia termica selezionata (consultare la guida d'uso di ciascuna fascia termica per le istruzioni sull'applicazione).

PASSAGGIO 8 Collegare l'estremità più piccola del tubo connettore alla fascia termica. Assicurarsi di sentire lo scatto di chiusura. Per scollegare basta premere il pulsante e staccare il connettore dalla sua presa.

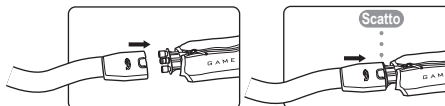

PASSAGGIO 9 Premere il pulsante di accensione/spegnimento.

PASSAGGIO 10 Regolare la temperatura girando l'apposita manopola. Girando la manopola verso destra, sul simbolo dei 3 cristalli di ghiaccio, si applicherà la terapia più fredda. Girando la manopola verso sinistra, sul simbolo di 1 cristallo di ghiaccio, si applicherà la terapia meno fredda. Attivare sempre l'unità di controllo con la manopola sul freddo massimo, mantenendola in quella posizione per almeno due minuti.

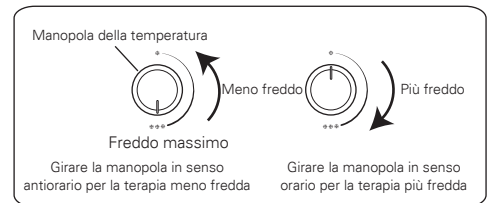

PASSAGGIO 11 Si può scegliere il funzionamento in modalità manuale o in modalità programma. La modalità manuale consente di regolare le impostazioni di tempo e di pressione. La modalità programma consente di scegliere uno dei sei programmi che forniscono il trattamento per un periodo di tempo impostato quindi la sospensione (no trattamento) per un altro periodo di tempo, continuamente, a un'impostazione di pressione specifica. Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso dell'unità di controllo a pagina 15. L'impostazione predefinita del sistema è la modalità manuale.

Modalità Manuale (Manual)

Impostare il tempo premendo i pulsanti +/- (-) (+) Impostare la pressione premendo il pulsante della pressione. (P)

Modalità Programma (Program)

Premere il pulsante del programma per accedere alla relativa modalità. Continuare a premere il pulsante per scorrere tutti i programmi disponibili. (P)

PASSAGGIO 12 Premere il pulsante di attivazione/pausa. (P)

ATTENZIONE - La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione di prescrizione medica. **Avvertenza** - L'applicazione incorretta o l'uso prolungato del Game Ready potrebbe causare lesioni come il congelamento ai tessuti cutanei. Rispettare le istruzioni dell'operatore sanitario. Interromperne immediatamente l'uso se si prova bruciore, prurito o maggior dolore e gonfiore. Controllare frequentemente le cute che riceve la terapia fredda e interrompere l'uso del dispositivo se sopravvivono cambiamenti come la comparsa di vesciche, maggior rossore, alterazione del colore o lividi.

Attenzione - Maneggiare l'unità di controllo con la stessa cura che verrebbe usata per un computer portatile. Non lasciarla cadere, urtarla o trattarla con incuria in nessun modo. Una tale incuria può annullare tutte le garanzie Game Ready.



Per ulteriori avvertenze e controindicazioni consultare il manuale d'uso dell'unità di controllo a pagina 5.