



GAME READYシステム

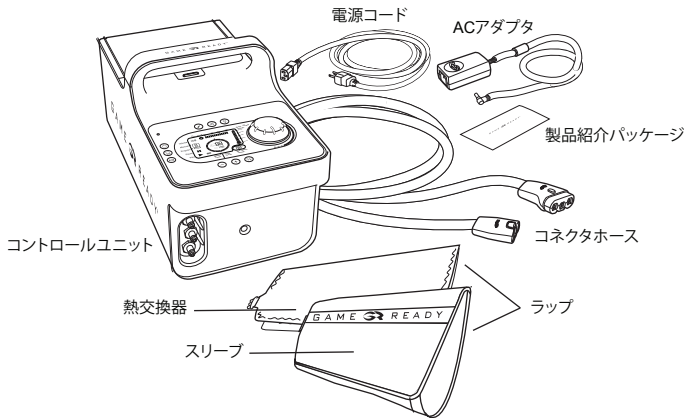


コントロールパネル

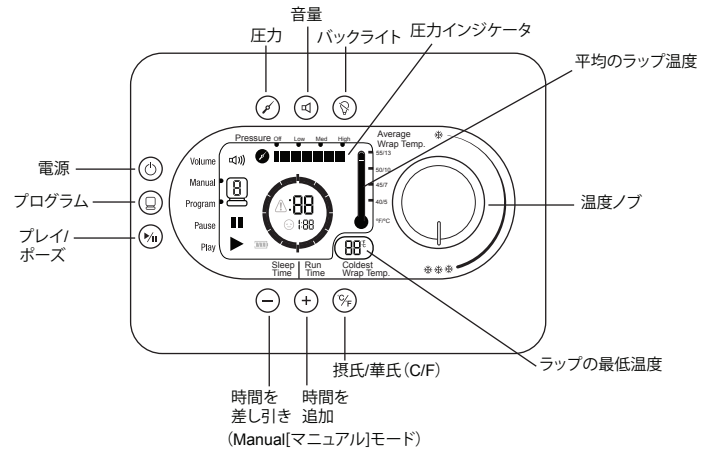


使い方


ステップ1 ドアリリースボタンを押して、アイスボックスドアを開けます。

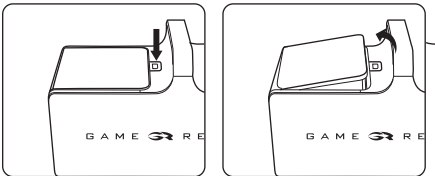

ステップ2 アイスボックスを氷で完全に満たし、また少なくとも半ばまでを清浄な水で満たします。

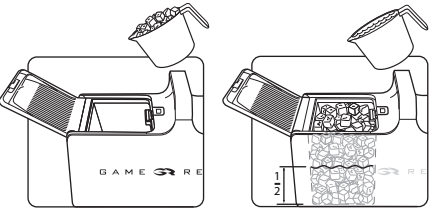


ステップ3 アイスボックスのドアを閉じます。カチッと音が聞こえることを確認します。

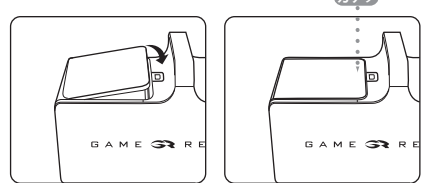


ステップ4 使用する予定の場所にコントロールユニットを置きます。コントロールユニットは、示すように直立状態でのみ使用します。




ステップ5 ACアダプタをコントロールユニットとアース付き電源コンセントに接続します。
注記: ラップを接続する前に、コントロールユニットの電源を入れて作動させます。

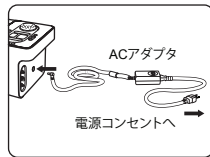

ステップ6 コネクタホースの大きい方の一端をコントロールユニットに接続します。カチッと音が聞こえることを確認します。外すには、単にボタンを押しポートからコネクタを取り外します。

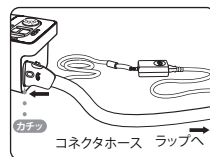

ステップ7 選択したラップを使用します(使用説明については各ラップの使用ガイドを参照してください)。

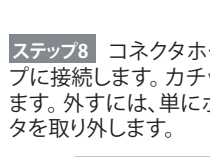


ステップ8 コネクタホースの小さい方の一端をラップに接続します。カチッと音が聞こえることを確認します。外すには、単にボタンを押しポートからコネクタを取り外します。



ステップ9 電源ボタンを押します。

ステップ10 温度ノブを回して温度を調節します。ノブを右(3つの雪マークの方)へ回すと、より強低温の療法を提供します。ノブを左(1つの雪マークの方)へ回すと、より弱低温の療法を提供します。コントロールユニットは、必ずノブを最も強低温の位置にして開始し、少なくとも2分間その状態で作動させます。

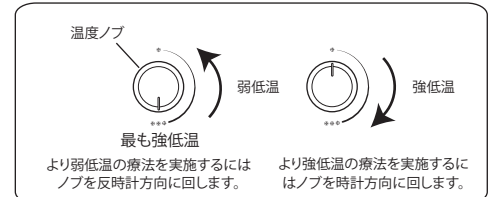

ステップ11 マニュアル(Manual)ードまたはProgram(プログラム)ードのいずれかでの操作を選択できます。マニュアルモードでは、時間と圧力の設定を調整できます。プログラム(Program)ードでは6種類のプログラムから1つを選択でき、これらのプログラムでは、特定の設定圧力で、或る設定時間の間治療を提供し、次に或る設定時間の間スリーブ(治療無し)させ、これを連続的に実施します。詳細についてはコントロールユニット使用説明書の15ページを参照してください。システムのデフォルト設定は(マニュアル)ードです。

マニュアル(Manual)ード:
+または-ボタンを押して時間を設定します。圧力ボタンを押すことによって圧力を設定します。

プログラム(Program)ード:
Programモードに入るにはプログラムボタンを押します。プログラムボタンを押し続けて、利用可能なプログラムをスクロールします。

ステップ12 プレイ/ポーズボタンを押します。

注意: 連邦法によると、この装置の販売は免許をもった医師によるもの、またはその医師の指示によるものに限定されています。**警告:** Game Readyを不適切に配置したり、長時間使用すると、凍傷などの組織損傷を起こすおそれがあります。医師の推奨に従ってください。火傷、痒み、または痛み及び腫れの増加があった場合には、直ちに使用を停止してください。冷却療法を受ける皮膚を頻繁に確認して、水腫れ、より強度な発赤、変色、またはみみず腫れが起こった場合は使用を停止してください。

注意: ラップトップパソコンと同様の取扱い方でコントロールユニットを注意して扱ってください。落としたり、蹴ったり、その他の不必要な誤使用をしないでください。そのような誤使用があると、Game Readyに関するすべての保証は無効になります。

その他の警告および禁忌については、コントロールユニット使用説明書の5ページを参照してください。