
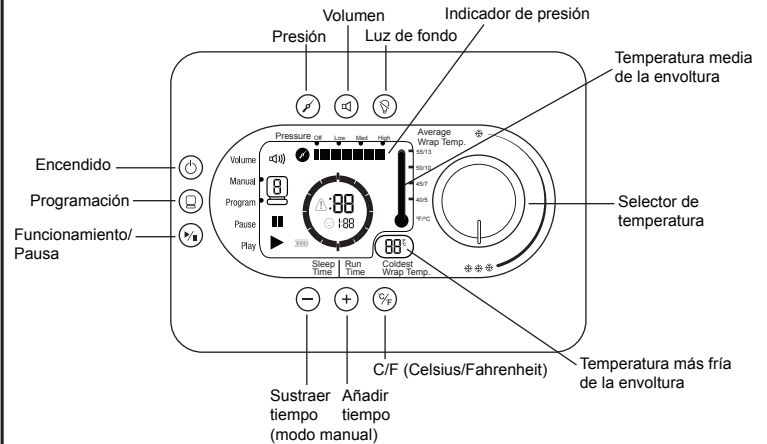



SU SISTEMA GAME READY

PANEL DE CONTROL

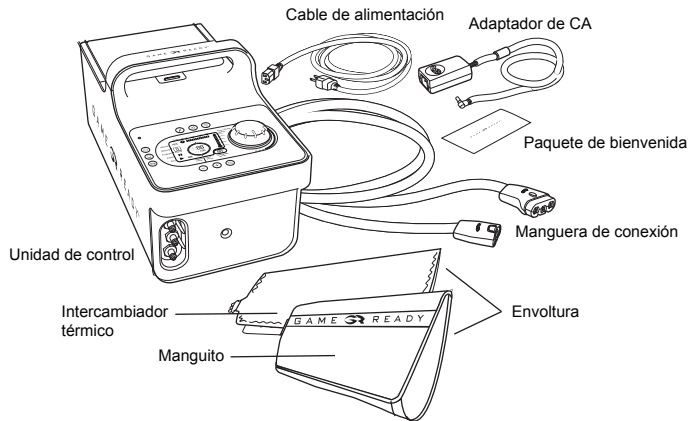


PRIMEROS PASOS


PASO 1 Pulse el botón de apertura de la puerta del depósito de hielo para abrirla.

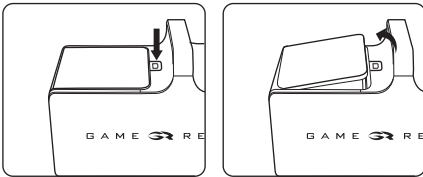

PASO 2 Llene el depósito hasta arriba con hielo y con agua limpia por lo menos hasta la mitad.

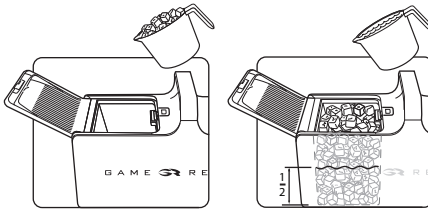


PASO 3 Cierre la puerta del depósito de hielo. Asegúrese de escuchar un chasquido.

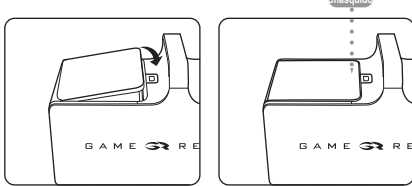


PASO 4 Coloque la unidad de control en el lugar en el que planea utilizarla. La unidad de control deberá sólo utilizarse en posición vertical tal como se ilustra.

PASO 5 Conecte el adaptador de CA a la unidad de control y a un enchufe eléctrico con toma de tierra. Nota: La unidad de control deberá estar encendida antes de conectar una envoltura.

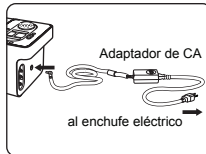


PASO 6 Conecte el extremo más grande de la manguera de conexión a la unidad de control. Asegúrese de escuchar un chasquido. Para desconectar, simplemente presione el botón y retire el conector de la manguera de conexión de su toma.

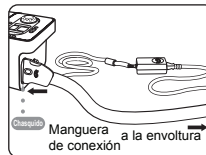


PASO 7 Aplique la envoltura seleccionada (consulte la Guía del usuario de cada envoltura para las instrucciones de aplicación).

PASO 8 Conecte el extremo más pequeño de la manguera de conexión a la envoltura. Asegúrese de escuchar un chasquido. Para desconectar, simplemente presione el botón y retire el conector de la manguera de conexión de su toma.

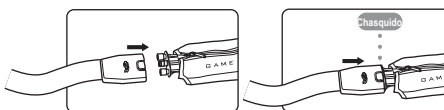

PASO 9 Pulse el botón de encendido.

PASO 10 Ajuste la temperatura con ayuda del selector de temperatura. Para una terapia más fría, gire el selector a la derecha, hacia el icono con 3 copos de nieve. Para una terapia menos fría, gire el selector a la izquierda, hacia el icono con 1 copo de nieve. Inicie siempre la unidad de control con el selector en la posición de frío máximo y deje que funcione así durante por lo menos dos minutos.

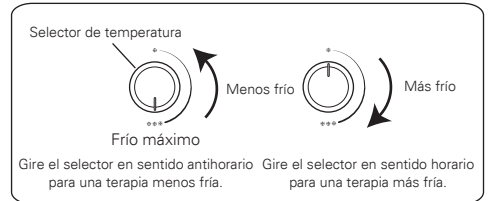

PASO 11 Puede elegir entre dos modos de operación: manual o programación. El modo manual le permite ajustar los valores del tiempo y de la presión. El modo de programación le permite elegir uno de seis programas que suministran continuamente tratamiento durante un tiempo fijo seguido de inactividad (ningún tratamiento) durante un tiempo fijo, a una presión determinada. En la página 15 del Manual del usuario de la Unidad de control encontrará información detallada. El sistema funciona de forma predeterminada en el modo manual.

Modo manual (Manual): Configure el tiempo pulsando los botones +/- (-) (+) Configure la presión pulsando el botón de presión.

Modo de Programación (Program): Pulse el botón de programación para entrar en dicho modo. Continúe pulsando el botón de programación para desplazarse por los programas disponibles.

PASO 12 Pulse el botón de funcionamiento/pausa.

PRECAUCIÓN: La legislación federal de EE.UU. limita la venta de este dispositivo únicamente a facultativos autorizados o por una orden facultativa. **Advertencia:** La colocación incorrecta o el uso prolongado de Game Ready podrían resultar en daño tisular, tal como congelación. Siga las recomendaciones del médico. Suspnda el uso inmediatamente si experimenta quemazón, escozor o un aumento del dolor y la hinchazón. Supervise con frecuencia la piel que recibe la terapia de frío y suspenda dicha terapia si se producen cambios como ampollas, enrojecimiento más acusado, alteración de la pigmentación o verdugones.

Precaución: Trate la unidad de control con el mismo cuidado con que trataría un portátil. No deje que se caiga, no le de un puntapié ni abuse de ella de ninguna otra forma sin necesidad. Un abuso de esta índole podría invalidar todas las garantías de Game Ready.



En la página 5 del Manual del usuario de la Unidad de control encontrará otras advertencias y contraindicaciones.